

Gebruiksaanwijzing.

U bent nu in het bezit van een **E.B.M.** systeem. Het is een **hulpmiddel** bij de uitoefening van uw beroep, ter voorkoming van het vallen en ter observatie van de bewoner/patiënt.

BED-ALARM voor op het matras, artikelnummer B.112.

Het bed-alarm bestaat uit: - 1 x sensor-mat, nr. B.1
- 1 x elektronisch kastje, nr. B.01
eventueel - 1 x tussensnoer, nr. B.002

BED-ALARM voor op het matras.

Gebruiksaanwijzing.

- De sensor-mat moet geplaatst worden onder het onderlaken. Bij incontinentie van de bewoner/patiënt, onder een incontinentie zeil.
- De sensor-mat moet zich onder de stuit van de bewoner/patiënt bevinden. Zorg er voor dat de sensor-mat niet dubbelgevouwen gebruikt wordt!
- Het kastje kunt u met het bijgeleverde bevestigingsmateriaal het beste onder de bedbodem bevestigen, bijvoorbeeld aan een bedpoot.
- Het snoer vanaf de sensor-mat stopt u met de plug in het kastje.
- Het tussensnoer: één plug stopt u in het elektronisch kastje, de andere plug in het zusteralarm.

AAN/UIT ZETTEN.

- Wanneer de batterij in het apparaat zit en de snoeren juist zijn bevestigd is het apparaat in bedrijf.
- Wanneer de bewoner/patiënt op bed ligt, steekt u de plug die aan het eind van het snoer zit vanaf het kastje in het zusteralarm.
- Het systeem is nu in bedrijf.
- Wanneer u het systeem niet gebruikt trekt u de plug uit de zusteroproep.

HET INSTELLEN VAN DE VERTRAGING.

- U kunt zelf bepalen hoe snel het alarm dient af te gaan van ongeveer 4 tot 7 seconden. Dit kan gedaan worden doormiddel van het rode draaiknopje aan de zijkant van het kastje.

ALGEMEEN: N.B. Controleer steeds voor gebruik of het systeem werkt!

- Bij alarm licht na enkele seconden (afhankelijk van de instelling) het groene lampje enige tijd op.

ONDERHOUD/STORINGEN.

- De batterij gaat maanden mee, afhankelijk van het gebruik en type batterij. Wel moet u regelmatig controleren of de batterij nog goed werkt, door het alarm even in werking te stellen, door een druk op de sensor-mat te geven. Het is aan te bevelen de batterij minimaal 1 x per jaar te vervangen
- Zorg er voor dat het snoer niet strak staat.
- Wanneer het alarm niet werkt, controleer dan:
 - . de batterij - leeg: vervangen
 - . is deze goed aangesloten?
 - . snoeren - geen breuk?
 - . pluggen - zijn ze goed aangesloten?
 - . zit de plug van het bed-alarm goed in de zusteroproep?
 - . werkt de zusteroproep?
 - . sensor-mat - is deze niet dubbel gevouwen?

*** juiste plug? Raadpleeg eventueel uw technische dienst, het kan soms zijn dat de plug niet in uw oproepsysteem past. De technische dienst kan dit zonder probleem aanpassen, aansluitingen zijn gelijk aan uw bel/druk systeem, onze contacten zijn spannings vrij.**

- Afhankelijk van gebruik, zal na ongeveer 6 maanden het inwendige van de sensor-mat mogelijk vernieuwd moeten worden.
- **Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, veroorzaakt door de ons geleverde producten of door het gebruik daarvan.**

Technische gegevens:

- * spanning max. 9 volt (batterij);
- * stroomverbruik in rust 1 ua;
- * stroomverbruik belast 2½ ua;
- * stroomverbruik bij alarm 47 ma (ged. 3 sec.).

- * contact belasting uitgang zusteralarm
max. 100 volt;
max. 50 ma;
- * contacten zijn potentiaal vrij.

N.B.

Om een correcte werking van het systeem te bereiken, moet men de gebruiksaanwijzing/waarschuwingen goed doornemen.

Een goede werking van het systeem is alleen gewaarborgd bij een omgevingstemperatuur van -10°C tot +50° (+14°F tot +122°F).

Een reparatie of het onderhoud aan het systeem mag alleen gedaan worden door een VAKMAN, die met de daarmee gepaard gaande gevaren of desbetreffende voorschriften vertrouwd is.

Controleer voor het in gebruik nemen van een nieuw systeem, of het systeem geen zware transport beschadigingen vertoont.

Controleer, voor u het systeem in gebruik neemt, of alle snoeren juist zijn bevestigd en de pluggen in de juiste contra stekers zijn gestoken.

Wanneer u het bed verplaatst, haal de plug van het systeem uit de zusteroproep.

Laat de snoeren van het elektronisch kastje en van de sensor-mat zo lopen dat niemand er over kan struikelen.

Vermijd direct contact van de sensor-mat met de huid van de bewoner/patiënt.

Zorg er voor dat de bewoner/patiënt niet aan het snoer of plug kan komen.

Vermijd spanningen hoger dan 9 volt (=batterij) en sluit alleen dat er op aan waarvoor het systeem gemaakt is.

Gebruik geen externe voedingen.

Zorg er voor dat de patiënt/bewoner niet direct op de sensor-mat komt te liggen.

Scherpe voorwerpen kunnen het systeem beschadigen.

Voorkom onnodig schuiven van de sensor-mat.

De sensor-mat en elektronisch kastje dienen droog bewaard te worden. Het verdient aanbeveling het systeem regelmatig, zeker bij verwisseling van bed, schoon te maken.

U kunt zowel de sensor-mat als het elektronisch kastje huishoudelijk schoonmaken (vochtig afnemen). Zorg dat beide onderdelen nadien goed gedroogd worden.

De sensor-mat mag niet opgevouwen gebruikt dan wel opgeborgen worden.

Met vriendelijke groet,

E.B.M