

Gebruiksaanwijzing.

U bent nu in het bezit van een **E.B.M.** systeem. Het is een **hulpmiddel** bij de uitoefening van uw beroep, ter voorkoming van het vallen en ter observatie van de bewoner/patiënt.

BED-ALARM voor onder het matras, akoestisch, artikelnummer B.O.233R

Het bed-alarm bestaat uit:

- 1 x sensor-mat, nr. B.O.2
- 1 x Zender
- 1 x Ontvanger
- 1 x Voeding

BED-ALARM voor onder het matras, akoestisch.

Gebruiksaanwijzing.

- De sensor-mat moet geplaatst worden onder het matras, in de breedte van het bed of diagonaal, ter hoogte van de stuit of schouders.

N.B. Bij plaatsing onder de schouders, zal het alarm al afgaan wanneer de patiënt/bewoner bezig is om het bed te gaan verlaten. Bij plaatsing ter hoogte van de stuit, zal het alarm afgaan wanneer de patiënt/bewoner uit of bijna uit bed is. U moet even uitproberen welke plaats het beste is.

U stopt de plug die aan het snoer zit van de sensor-mat in de contra plug van het verlengsnoer en de andere plug in het belkastje die u dan eventueel in een andere ruimte kunt plaatsen.

AAN/UIT ZETTEN.

- Wanneer de batterij in het apparaat zit de voeding en snoeren juist zijn bevestigd is het apparaat in bedrijf.

HET INSTELLEN VAN DE VERTRAGING.

- U kunt zelf bepalen hoe snel het alarm dient af te gaan van ongeveer 2 tot 5 seconden. Dit kan gedaan worden doormiddel van het rode draaiknopje aan de zijkant van het kastje.

ALGEMEEN: N.B. Controleer steeds voor gebruik of het systeem werkt!

ONDERHOUD/STORINGEN.

- U kunt zowel de sensor-mat als het kastje vochtig schoonmaken.

- De batterij gaat maanden mee, afhankelijk van het gebruik en type batterij. Wel moet u regelmatig controleren of de batterij nog goed werkt, door het alarm even in werking te stellen, door een druk op de sensor-mat te geven. Het is aan te bevelen de batterij minimaal 1 x per jaar te vervangen.

- Zorg er voor dat het snoer niet strak staat.


- Wanneer het alarm niet werkt, controleer dan:

- de batterij
 - leeg: vervangen
 - is deze goed aangesloten?
- snoeren
 - geen breuk?
- pluggen
 - zijn ze goed aangesloten?
 - zit de plug van het bed-alarm goed in de contra-plug van het verlengsnoer?
 - zit de plug van het verlengsnoer goed in het belkastje?
 - werkt het belkastje?

- Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, veroorzaakt door de ons geleverde producten of door het gebruik daarvan.

Technische gegevens:

- * spanning max. 9 volt (batterij);
- * stroomverbruik in rust 1 uA;
- * stroomverbruik belast 2½ uA;
- * stroomverbruik bij alarm 25/35 mA (ged. 90 sec.).

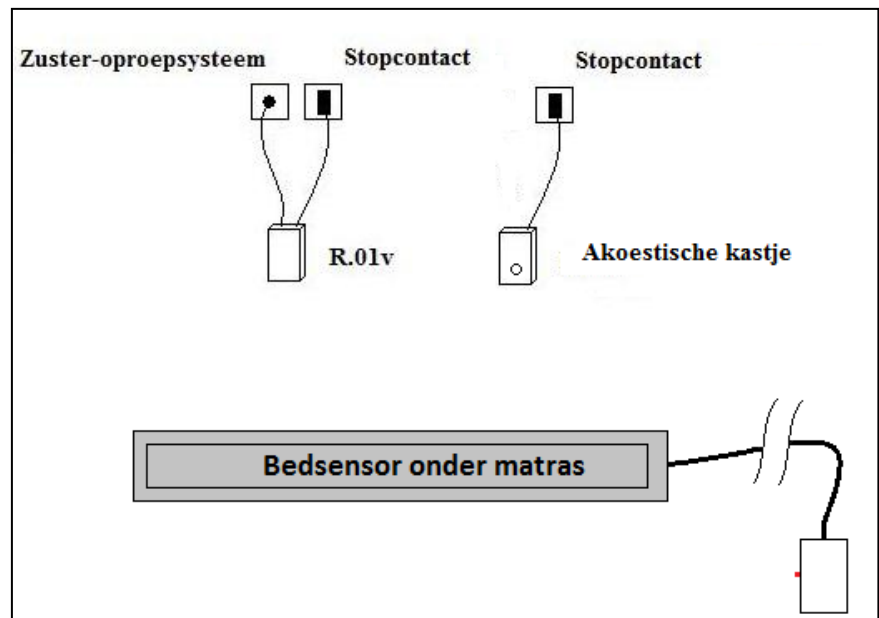

N.B.

Om een correcte werking van het systeem te bereiken, moet men de gebruiksaanwijzing/waarschuwingen goed doornemen.

Een goede werking van het systeem is alleen gewaarborgd bij een omgevingstemperatuur van -10°C tot +50° (+14°F tot +122°F).

Een reparatie of het onderhoud aan het systeem mag alleen gedaan worden door een VAKMAN, die met de daarmee gepaard gaande gevaren of desbetreffende voorschriften vertrouwd is.

Controleer voor het in gebruik nemen van een nieuw systeem, of het systeem geen zware transport beschadigingen vertoont.

Controleer, voor u het systeem in gebruik neemt, of alle snoeren juist zijn bevestigd en de pluggen in de juiste contra stekers zijn gestoken.

Laat de snoeren van het elektronisch kastje en van de sensor-mat zo lopen dat niemand er over kan struikelen.

Vermijd direct contact van de sensor-mat met de huid van de bewoner/patiënt.

Zorg er voor dat de bewoner/patiënt niet aan het snoer of plug kan komen.

Sluit alleen dat er op aan waarvoor het systeem gemaakt is.

Gebruik geen externe voedingen.

Zorg er voor dat de patiënt/bewoner niet direct op de sensor-mat komt te liggen.

Scherpe voorwerpen kunnen het systeem beschadigen.

De sensor-mat en elektronisch kastje dienen droog bewaard te worden. Het verdient aanbeveling het systeem regelmatig, zeker bij verwisseling van bed, schoon te maken.

U kunt zowel de sensor-mat als het elektronisch kastje huishoudelijk schoonmaken (vochtig afnemen).

Zorg dat beide onderdelen nadien goed gedroogd worden.

Met vriendelijke groet,

E.B.M