

Gebruiksaanwijzing.

U bent nu in het bezit van een **E.B.M.** systeem. Het is een **hulpmiddel** bij de uitoefening van uw beroep, ter voorkoming van het vallen en ter observatie van de bewoner/patiënt.

Vloermat-alarm, artikelnummer D.6 of D.4 + D.03 en eventueel B.003.

De vloermat-alarm bestaat uit: - 1 x vloer-mat, nr. D.6 of D.4
 - 1 x akoestische kastje, nr. D.03
en eventueel: - 1 x verlengsnoer, nr. B.003

Gebruiksaanwijzing.

VLOERMAT-ALARM.

- De sensor-mat kan geplaatst worden waar u wilt. Bijvoorbeeld voor het bed, wanneer u wilt weten of een patiënt/bewoner uit bed komt, of voor de deur, als u wilt weten wanneer de patiënt/bewoner de kamer gaat verlaten. Bij D.4 kunt u de sensor-mat ook onder de vloerbedekking plaatsen.
- Zorg er voor dat de sensor-mat niet dubbelgevouwen gebruikt wordt!
- Het snoer van de sensor-mat stopt u in de contra-plug van het verlengsnoer. De plug van het verlengsnoer sluit aan op het alarmkastje (apart bij te bestellen, indien er geen zusteroproep aanwezig is).

AAN/UIT ZETTEN.

- Wanneer de batterij in het apparaat zit (D.03) en de snoeren juist zijn bevestigd is het apparaat in bedrijf.
- Met de rode schakelaar aan de zijkant van het alarmkastje kunt u het geluid harder of zachter zetten. Het geluid zet u uit door de resetknop aan de bovenkant van het alarmkastje in te drukken (na verloop van tijd reset het systeem zichzelf).
- Wanneer u het systeem niet gebruikt trekt u de plug uit het alarmkastje.

ALGEMEEN: N.B. Controleer steeds voor gebruik of het systeem werkt, door een druk te geven op de sensormat!

ONDERHOUD/STORINGEN.

- De batterij gaat maanden mee (D.03), afhankelijk van het gebruik en type batterij. Wel moet u regelmatig controleren of de batterij nog goed werkt, door het alarm even in werking te stellen met een druk op de sensor-mat. Het is aan te bevelen de batterij minimaal 1 x per jaar te vervangen.
- Zorg er voor dat het snoer niet strak staat.
- Wanneer het alarm niet werkt, controleer dan:
 - de batterij (D.03) - leeg: vervangen
 - is deze goed aangesloten?
 - snoeren - geen breuk?
 - pluggen - zijn deze goed aangesloten?
 - sensor-mat - is deze niet dubbel gevouwen?
- Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, veroorzaakt door de ons geleverde producten of door het gebruik daarvan.

Technische gegevens: (D03)

- * spanning max. 9 volt (batterij);
- * stroomverbruik in rust 1 ua;
- * stroomverbruik belast 2½ ua;
- * stroomverbruik bij alarm 47 ma (ged. 30 sec.).
- * vloermat max. 24volt 10 ma;

N.B.

Om een correcte werking van het systeem te bereiken, moet men de gebruiksaanwijzing/waarschuwingen goed doornemen.

Een goede werking van het systeem is alleen gewaarborgd bij een omgevingstemperatuur van -10°C tot +50° (+14°F tot +122°F).

Een reparatie of het onderhoud aan het systeem mag alleen gedaan worden door een VAKMAN, die met de daarmee gepaard gaande gevaren of desbetreffende voorschriften vertrouwd is.

Controleer voor het ingebruik nemen van een nieuw systeem, of het systeem geen zware transport beschadigingen vertoont.

Controleer, voor u het systeem in gebruik neemt, of de pluggen in de juiste contra-stekers zijn gestoken.

Laat het snoeren zo lopen dat niemand er over kan struikelen.

Vermijd direct contact van de sensor-mat met de huid van de bewoner/patiënt.

Zorg er voor dat de bewoner/patiënt niet aan het snoer of plug kan komen.

Sluit alleen dat er op aan waarvoor het systeem gemaakt is.

Gebruik geen externe voedingen.

Scherpe voorwerpen kunnen het systeem beschadigen.

Voorkom onnodig schuiven van de sensor-mat.

Voorkom dat de sensor-mat kan wegglijden, met name op een natte ondergrond bestaat dit gevaar.

De sensor-mat en het elektronisch kastje dienen droog bewaard te worden. Het verdient aanbeveling het systeem regelmatig, schoon te maken.

U kunt zowel de sensor-mat als het elektronisch kastje huishoudelijk schoonmaken (vochtig afnemen). Zorg nadien dat beide onderdelen goed gedroogd worden.

De sensor-mat mag niet opgevouwen gebruikt danwel opgeborgen worden.

Met vriendelijke groet,

E.B.M