

Gebruiksaanwijzing.

U bent nu in het bezit van een **E.B.M.** systeem. Het is een **hulpmiddel** bij de uitoefening van uw beroep, ter voorkoming van het vallen en ter observatie van de bewoner/patiënt.

Vloermat-alarm, artikelnummer D.6R

De vloermat-alarm bestaat uit:

- 1 x vloer-mat, nr. D.6R
- 1 x elektronisch kastje, nr. R.01v of akoestisch kastje
- 1 x voeding en 1x 12 volt batterij

Gebruiksaanwijzing.

VLOERMAT-ALARM.

- De sensor-mat kan geplaatst worden waar u wilt. Bijvoorbeeld voor het bed, wanneer u wilt weten of een patiënt/bewoner uit bed komt, of voor de deur, als u wilt weten wanneer de patiënt/bewoner de kamer gaat verlaten.
- Zorg er voor dat de sensor-mat niet dubbelgevouwen gebruikt wordt!
- Het elektronische kastje van de sensor-mat stopt u in het zuster-oproepsysteem.
- De ontvanger dient binnen een straal van maximaal 10 tot 30 meter van de vloer-mat te worden geplaatst afhankelijk van de omgeving.
- Indien er geen zusteroproep aanwezig is kunt u een akoestisch kastje in plaats van de R.0v aansluiten.
- Zie aansluitschema in afbeelding.

AAN/UIT ZETTEN (R.01v).

- Wanneer de voeding in de ontvanger (R.01) zit. En de batterij in de vloer-mat zit (deze is los mee geleverd).
- Wanneer u het systeem niet gebruikt trekt u de voeding uit het alarmkastje en legt u de vloer-mat niet gevouwen weg.

ALGEMEEN: N.B. Controleer steeds voor gebruik of het systeem werkt, door een druk te geven op de sensormat!

ONDERHOUD/STORINGEN.

- De batterij van de vloer-mat gaat ongeveer een maand tot een half jaar mee (D.6R), afhankelijk van het gebruik en merk batterij. Wel moet u regelmatig controleren of de batterij nog goed werkt, door het alarm even in werking te stellen door op de vloer-mat te gaan staan of drukken.

- Wanneer het alarm niet werkt, controleer dan:

- | | |
|------------|---------------------------------|
| Batterij | - is de batterij nog goed? |
| snoeren | - geen breuk? |
| pluggen | - zijn deze goed aangesloten? |
| sensor-mat | - is deze niet dubbel gevouwen? |


- Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, veroorzaakt door de ons geleverde producten of door het gebruik daarvan. De vloermat-alarm is een hulpmiddel in de totale keten van maatregelen die nodig is om het risico op vallen te verminderen, maar kan deze niet uitsluiten.

De vloermat-alarm is getest voor gebruik in verzorgingshuizen of thuis gebruik, maar niet voor ziekenhuis of verpleeg huizen. Elektromagnetische straling van apparatuur die mogelijk in ziekenhuizen of verpleeghuizen gebruikt wordt kan valse meldingen geven.

Technische gegevens: D.6R
* spanning max. 12V (batterij);
* zend frequentie 433MHz

Technische gegevens: R.01v
* spanning max. 12V, 0.5A, 6W
Max (voeding);

Technische gegevens:
Akoestische kastje
* spanning max. 12V, 0.5A, 6W
Max (voeding);

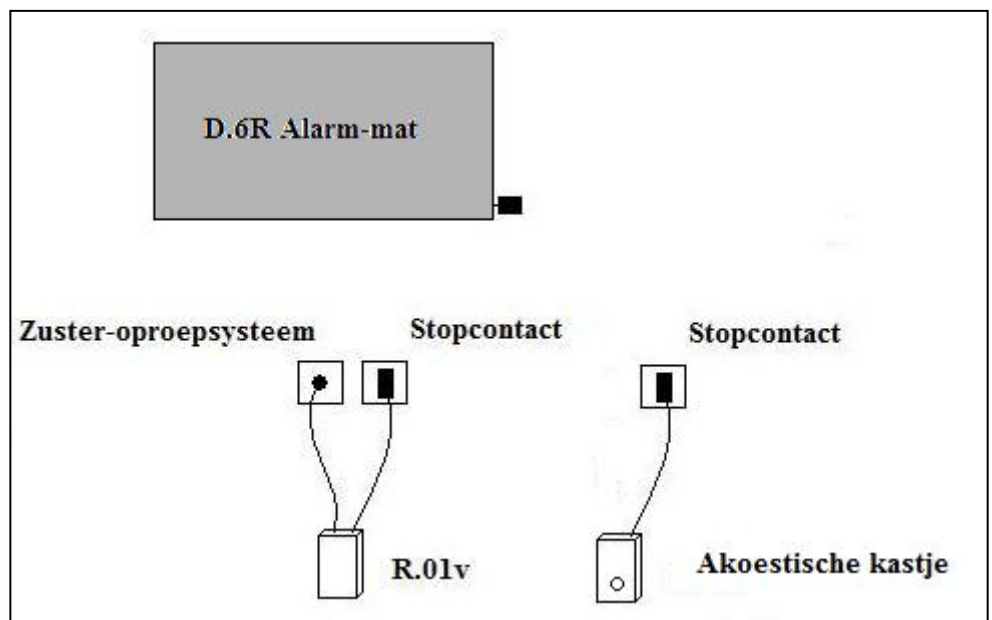

N.B.

Om een correcte werking van het systeem te bereiken, moet men de gebruiksaanwijzing/waarschuwingen goed doornemen.

Een goede werking van het systeem is alleen gewaarborgd bij een omgevingstemperatuur van 10°C tot +50°.

Een reparatie of het onderhoud aan het systeem mag alleen gedaan worden door een VAKMAN, die met de daarmee gepaard gaande gevaren of desbetreffende voorschriften vertrouwd is.

Controleer voor het in gebruik nemen van een nieuw systeem, of het systeem geen zware transport beschadigingen vertoont.

Controleer, voor u het systeem in gebruik neemt, of de pluggen in de juiste contra stekers zijn gestoken.

Laat het snoeren zo lopen dat niemand er over kan struikelen.

Vermijd direct contact van de sensor-mat met de huid van de bewoner/patiënt.

Zorg er voor dat de bewoner/patiënt niet aan het snoer of plug kan komen.

Sluit alleen dat er op aan waarvoor het systeem gemaakt is.

Gebruik geen externe voedingen.

Scherpe voorwerpen kunnen het systeem beschadigen.

Voorkom onnodig schuiven van de sensor-mat.

Voorkom dat de sensor-mat kan wegglijden, met name op een natte ondergrond bestaat dit gevaar.

De sensor-mat en het elektronisch kastje dienen droog bewaard te worden. Het verdient aanbeveling het systeem regelmatig, schoon te maken.

U kunt zowel de sensor-mat als het elektronisch kastje huishoudelijk schoonmaken (vochtig afnemen). Zorg nadien dat beide onderdelen goed gedroogd worden.

De sensor-mat mag niet opgevouwen gebruikt dan wel opgeborgen worden.

Met vriendelijke groet,

E.B.M