

Gebruiksaanwijzing.

U bent nu in het bezit van een **E.B.M.** systeem. Het is een **hulpmiddel** bij de uitoefening van uw beroep, ter voorkoming van het vallen en ter observatie van de bewoner/patiënt.

STOEL-ALARM, artikelnummer S.36.

De stoel-alarm bestaat uit: - 1 x sensor-mat, nr. S.3
 - 1 x elektronisch kastje, nr. S.06
Eventueel - 1 x verlengsnoer, nr.B.003

STOEL-ALARM.

Gebruiksaanwijzing.

- De sensor-mat legt u op de zitting van de (rol)stoel. Zorg er voor dat de sensor-mat niet dubbelgevouwen gebruikt wordt!
- Het kastje kunt u met het bijgeleverde bevestigingsmateriaal bevestigen aan de (rol)stoel.
- Het snoer vanaf de sensor-mat stopt u met de plug in het kastje.

AAN/UIT ZETTEN.

- Wanneer de batterij in het apparaat zit en de plug is aangesloten, is het systeem in bedrijf.
- Het systeem kunt u uit zetten door de resetknop, bovenop het kastje in te drukken.

HET INSTELLEN VAN DE VERTRAGING.

- U kunt zelf bepalen hoe snel het alarm dient af te gaan van ongeveer 1 tot 5 seconden. Dit kan gedaan worden doormiddel van het rode draaiknopje aan de zijkant van het kastje.

ALGEMEEN: N.B. Controleer steeds voor gebruik of het systeem werkt, door een druk te geven op de sensor-mat!

ONDERHOUD/STORINGEN.

- De batterij gaat maanden mee, afhankelijk van het gebruik en type batterij. Wel moet u regelmatig controleren of de batterij nog goed werkt, door het alarm even in werking te stellen, door een druk op de sensor-mat te geven. Het is aan te bevelen de batterij minimaal 1 x per jaar te vervangen
- Zorg er voor dat het snoer niet strak staat.
- Wanneer het alarm niet werkt, controleer dan:
 - de batterij - leeg: vervangen
 - is deze goed aangesloten?
 - snoer - geen breuk?
 - plug - is deze goed aangesloten
 - sensor-mat - is deze niet dubbel gevouwen?

- Afhankelijk van gebruik, zal na ongeveer 6 maanden het inwendige van de sensor-mat mogelijk vernieuwd moeten worden.
- Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, veroorzaakt door de ons geleverde producten of door het gebruik daarvan.

Technische gegevens:

- * spanning max. 9 volt (batterij);
- * stroomverbruik in rust 1 ua;
- * stroomverbruik belast 2½ ua;
- * stroomverbruik bij alarm 25/35 ma (ged. 90 sec.).

N.B.

**Om een correcte werking van het systeem te bereiken, moet men de gebruiksaanwijzing/waarschuwingen goed doorne-
men.**

**Een goede werking van het systeem is alleen gewaarborgd bij een omgevingstemperatuur van -10°C tot +50° (+14°F tot
+122°F).**

**Een reparatie of het onderhoud aan het systeem mag alleen gedaan worden door een VAKMAN, die met de daarmee
gepaard gaande gevaren of desbetreffende voorschriften vertrouwd is.**

**Controleer voor het ingebruik nemen van een nieuw systeem, of het systeem geen zware transport beschadigingen ver-
toont.**

**Controleer, voor u het systeem in gebruik neemt, of alle snoeren juist zijn bevestigd en de pluggen in de juiste contra-
stekers zijn gestoken.**

Laat de snoeren van de sensor-mat zo lopen dat niemand er over kan struikelen.

Vermijd direct contact van de sensor-mat met de huid van de bewoner/patiënt.

Zorg er voor dat de bewoner/patiënt niet aan het snoer of plug kan komen.

Vermijd spanningen hoger dan 9 volt (=batterij) en sluit alleen dat er op aan waarvoor het systeem gemaakt is.

Gebruik geen externe voedingen.

Zorg er voor dat de patiënt/bewoner niet direct op de sensor-mat komt te zitten.

Scherpe voorwerpen kunnen het systeem beschadigen.

Voorkom onnodig schuiven van de sensor-mat.

**De sensor-mat en elektronisch kastje dienen droog bewaard te worden. Het verdient aanbeveling het systeem regelma-
tig, zeker bij verwisseling van (rol)stoel, schoon te maken.**

**U kunt zowel de sensor-mat als het elektronisch kastje huishoudelijk schoonmaken (vochtig afnemen). Zorg dat beide
onderdelen nadien goed gedroogd worden.**

De sensor-mat mag niet opgevouwen gebruikt danwel opgeborgen worden.

Met vriendelijke groet,

E.B.M