

Gebruiksaanwijzing.

U bent nu in het bezit van een **E.B.M.** systeem. Het is een **hulpmiddel** bij de uitoefening van uw beroep, ter voorkoming van het vallen en ter observatie van de bewoner/patiënt.

STOEL-ALARM, artikelnummer S.36.z

De stoel-alarm bestaat uit: - 1 x sensormat, nr. S.3
 - 1 x elektronisch kastje, nr. B.01
Eventueel - 1 x tussen snoer, nr. B.002

STOEL-ALARM.

Gebruiksaanwijzing.

- De sensormat legt u op de zitting van de (rol)stoel. Zorg er voor dat de sensormat niet dubbelgevouwen gebruikt wordt!
- Het kastje kunt u met het bijgeleverde bevestigingsmateriaal bevestigen aan de (rol)stoel.
- Het snoer vanaf de sensormat stopt u met de plug in het kastje, en met behulp van het tussen snoer kunt u deze aansluiten op het zusteralarm.

AAN/UIT ZETTEN.

- Wanneer de batterij in het apparaat zit en de plug is aangesloten, is het systeem in bedrijf.

HET INSTELLEN VAN DE VERTRAGING.

- U kunt zelf bepalen hoe snel het alarm dient af te gaan van ongeveer 1 tot 5 seconden. Dit kan gedaan worden doormiddel van het rode draaiknopje aan de zijkant van het kastje.

ALGEMEEN: N.B. Controleer steeds voor gebruik of het systeem werkt, door een druk te geven op de sensormat, en dat de druk weer weg te nemen!

ONDERHOUD/STORINGEN.

- De batterij gaat maanden mee, afhankelijk van het gebruik en type batterij. Wel moet u regelmatig controleren of de batterij nog goed werkt, door het alarm even in werking te stellen, door een druk op de sensormat te geven. Het is aan te bevelen de batterij minimaal 1 x per jaar te vervangen
- Zorg er voor dat het snoer niet strak staat.
- Wanneer het alarm niet werkt, controleer dan:
 - de batterij - leeg: vervangen
 - is deze goed aangesloten?
 - snoer - geen breuk?
 - plug - is deze goed aangesloten
 - sensormat - is deze niet dubbel gevouwen?

- Afhankelijk van gebruik, zal na ongeveer 6 maanden het inwendige van de sensormat mogelijk vernieuwd moeten worden.
- Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, veroorzaakt door de ons geleverde producten of door het gebruik daarvan.

Technische gegevens:

- * spanning max. 9 volt (batterij);
- * stroomverbruik in rust 1 ua;
- * stroomverbruik belast 2½ ua;
- * stroomverbruik bij alarm 25/35 ma (ged. 90 sec.).

N.B.

**Om een correcte werking van het systeem te bereiken, moet men de gebruiksaanwijzing/waarschuwingen goed doorne-
men.**

Een goede werking van het systeem is alleen gewaarborgd bij een omgevingstemperatuur van -10°C tot +50° (+14°F tot +122°F).

Een reparatie of het onderhoud aan het systeem mag alleen gedaan worden door een VAKMAN, die met de daarmee gepaard gaande gevaren of desbetreffende voorschriften vertrouwd is.

**Controleer voor het in gebruik nemen van een nieuw systeem, of het systeem geen zware transport beschadigingen ver-
toont.**

**Controleer, voor u het systeem in gebruik neemt, of alle snoeren juist zijn bevestigd en de pluggen in de juiste contra-
stekkers zijn gestoken.**

Laat de snoeren van de sensormat zo lopen dat niemand er over kan struikelen.

Vermijd direct contact van de sensormat met de huid van de bewoner/patiënt.

Zorg er voor dat de bewoner/patiënt niet aan het snoer of plug kan komen.

Vermijd spanningen hoger dan 9 volt (=batterij) en sluit alleen dat er op aan waarvoor het systeem gemaakt is.

Gebruik geen externe voedingen.

Zorg er voor dat de patiënt/bewoner niet direct op de sensormat komt te zitten.

Scherpe voorwerpen kunnen het systeem beschadigen.

Voorkom onnodig schuiven van de sensormat.

De sensormat en elektronisch kastje dienen droog bewaard te worden. Het verdient aanbeveling het systeem regelmatig, zeker bij verwisseling van (rol)stoel, schoon te maken.

U kunt zowel de sensormat als het elektronisch kastje huishoudelijk schoonmaken (vochtig afnemen). Zorg dat beide onderdelen nadien goed gedroogd worden.

De sensormat mag niet opgevouwen gebruikt dan wel opgeborgen worden.

Met vriendelijke groet,

E.B.M